

# BeneHeart C & S 系列 自動心臟除顫器

## 快速參考指南

1



2





確定患者沒有反應，而且沒有呼吸或僅喘息。

打開自動心臟除顫器上蓋。

**致電緊急醫療服務！**

3

貼上電極片。

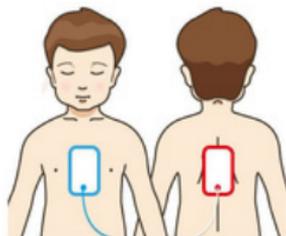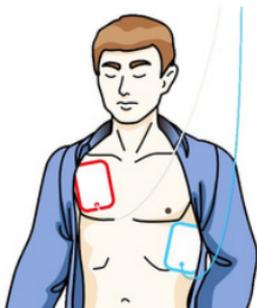

4

發送電擊。

如果建議電擊

全自動機型：  
自動心臟除顫器會  
自動電擊患者。

半自動機型：  
在 30 秒內按下電擊  
按鈕。



如果不建議電擊

按照提示進行心肺復甦。



**mindray**